

	PROTOCOLE DE PRELEVEMENT VAGINAL POUR LA RECHERCHE DE STREPTO B PAR PCR RAPIDE		
	FORMULAIRE	Référence : HMA-LABO-C2-ENR-014	Version : 2 Page : 1/1

IMPORTANT : Réaliser le prélèvement **avant d'utiliser un spéculum ou un lubrifiant**

- Double écouvillon spécifique à utiliser :

(Transystem LQ Stuart, réf Cepheid 900-0370)




- Utiliser de la gaze ou une compresse pour essuyer les sécrétions ou écoulement excédentaire

(risque de **résultat ininterprétable** en cas de **prélèvement trop épais**)



- Insérer avec précaution le double écouvillon dans le **1/3 inférieur du vagin** et prélever les sécrétions en faisant **tourner l'écouvillon 3 fois** pour un échantillon uniforme sur les 2 écouvillons

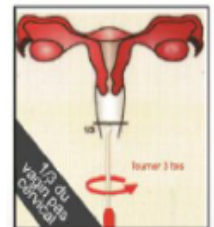

- Enlever et jeter le capuchon du tube de transport et placer le double écouvillon dans le tube en enfonçant complètement le capuchon rouge. Bien identifier le tube de prélèvement.



Transmettre immédiatement le prélèvement au laboratoire (pneumatique autorisé)